

## TEST MOLECOLARI SALIVARI

Aprire la provetta "LolliSponge" per la raccolta della saliva con applicata l'etichetta identificativa dell'utente applicata (**figura 1**) e procedere all'esecuzione del prelievo salivare (**figura 2**):



Figura 1: provetta con etichetta.

1. Eseguire il prelievo salivare al mattino prima di mangiare, bere, o lavarsi i denti;
2. Lavare o igienizzare le mani prima di usare il dispositivo;
3. Aprire la provetta e tenerla come illustrato in **figura 2A**, facendo in modo che la spugna non tocchi superfici o altre parti del corpo diverse dalla bocca;
4. Introdurre delicatamente il dispositivo all'interno della bocca e muoverlo, a bocca chiusa, nella parte superiore della lingua e fra denti e guance per 60 secondi (**figura 2 B e C**);
5. Non mordere la spugna;
6. Estrarre il tampone dalla bocca e richiuderlo all'interno del tubo di raccolta avvitando bene (**figura 2 D**).

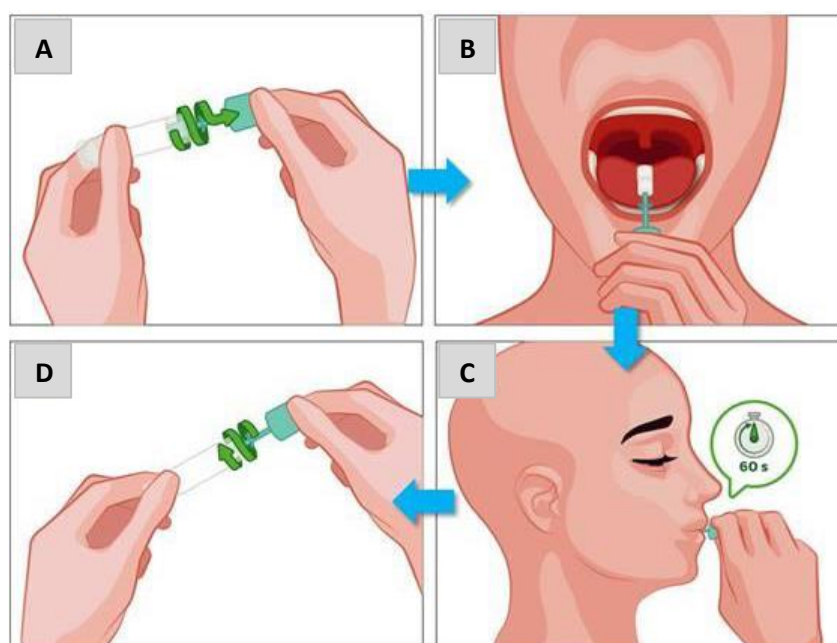


Figura 2: modalità di esecuzione del prelievo



Figura 3: tampone all'interno della busta per il trasporto

Una volta eseguito il prelievo salivare introdurre la provetta con il tampone all'interno della busta per il trasporto dei campioni biologici (**Figura 3**) e consegnarlo al personale scolastico di riferimento non appena giunti a scuola.

I campioni biologici (saliva) conferiti al personale scolastico di riferimento della scuola saranno alloggiati, con la busta di trasporto, all'interno del contenitore "grande" fornito dalla ASL per il successivo trasporto dei campioni biologici alla UOSD Laboratorio di Genetica Medica, accettazione Laboratorio COVID piano 2 blocco A stanza 2° Ospedale Belcolle.